

INSTRUCTIVO ENVÍO DE BIOPSIAS AL LABORATORIO

1. ENVÍO DE MUESTRA EN FRASCO ESTERIL

Solicitar material para envío de Biopsias en Central de Abastecimiento al correo abastecimiento@grupoh.cl. Este corresponde a un frasco estéril que contiene Formalina.

2. PRECAUCIONES

La Formalina esta clasificada como sustancia peligrosa, es un gas incoloro de olor fuerte. **INFLAMABLE, CORROSIVO Y CARCINOGENO**. Se debe tomar las precauciones para su correcta manipulación, utilizando elementos de protección personal tales como Guantes, mascarilla, pechera impermeable y antiparras.

3. PROCEDIMIENTO

Al momento de obtener la(s) muestra(s) se debe depositar inmediatamente al frasco estéril que contiene Formalina, la muestra debe quedar completamente sumergida. Cerrar herméticamente el frasco y asegurarse que no existan filtraciones.

Se recomienda dejar la muestra a temperatura ambiente y que no sobrepase los 25°C.

Rotular el frasco con los siguientes datos del paciente:

- Nombre completo
- RUT
- Fecha de obtención

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

La muestra debe ser acompañada de la orden de solicitud de examen, es **OBLIGATORIO** que contenga los siguientes datos:

- Nombres , apellidos, RUT, fecha de nacimiento y edad del paciente.
- Nombre, apellidos, RUT y Firma de Médico solicitante.
- Debe Indicar el tipo de muestra eHipotesis diagnóstica.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones consulte al 228360700